

Golvvåg för medicinskt bruk Förenklat handhavande

MBHA-300




www.liden-weighing.com

SPECIFIKATIONER

Modell	MBHA-300M
Max kapacitet	300 kg
Avläsbarhet	100 g
Noggrannhet	OIML Klass III
Taraområde	100 %
Min. belastning	2 kg

Specifikationer	
Display	25 mm hög, 5 segment, LCD-display med bakgrundsbelysning
Konstruktion	Metallkonstruktion
Produkt storlek	640 x 720 x 1095 mm
Plattform storlek	600 x 600mm
Stabiliserings tid, ca	3 Sekunder standard
Arbetstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Strömförsörjning	7,5V/1A AC adapter och Batterier 6xAA
Eu-verifierad i enlighet med 2014/31/EU	Klass III
MDD-godkänd i enlighet med 93/42/EEC	Klass I

Frontpanel

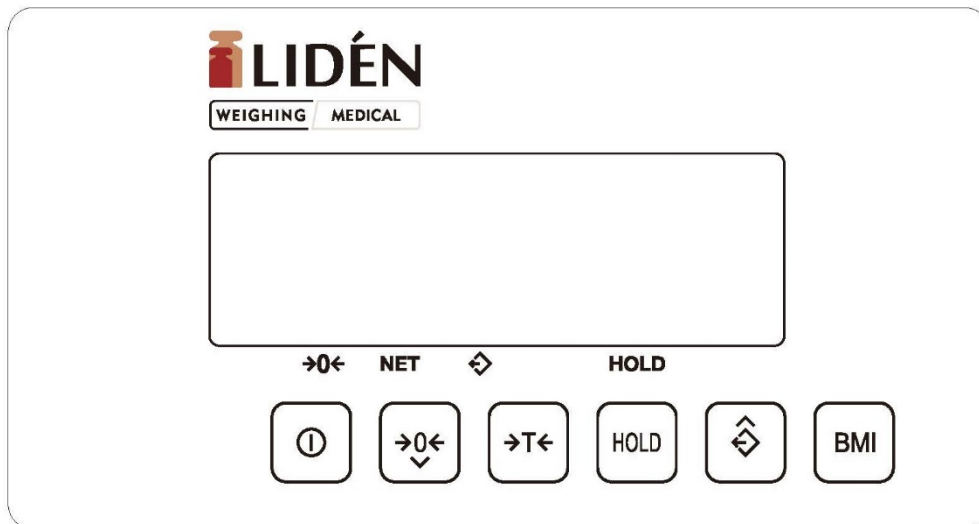

Knappar



På / Av



Nollställningsknapp



Tareringsknapp



Holdfunktion



Återkalla



BMI-funktion

Symboler



Nollindikering



Nettoindikering/Vågen är i tarerat läge



Återkallat värde



Låst värde



Stabilt värde

Handhavande & knappfunktioner



På / Av

Tryck kort för att sätta på och stänga av vågen.




Nollställningsknapp


Nollställer vågens display. Används vid obelastad våg.

 indikeras.




Tareringsknapp



Tareringsknappen används för att tarera sådant som vägs tillsammans med patienten, (t ex kläder, skor eller annat). Gör så här: placera en vikt (kläder, skor eller annat) på vågen. Tryck på  för att dra bort denna vikt. Displayen kommer att visa **NET**.


Ta bort (kläder, skor eller annat) och tryck på  för att gå ur tarafunktion.









Manuell eller automatisk holdfunktion

I nolläge kan man använda sig av manuell eller automatisk holdfunktion genom att trycka på  i displayen visas **Hold Auto** eller **Hold Off**.

Manuell hold: Ställ dig på vågen. Vänta på stabilt värde och tryck sedan  för att låsa värdet. Displayen återgår till noll efter ca en sekund. Värdet hämtas upp genom att trycka på  Återkalla.



Automatisk Hold: Ställ in **Hold Auto** enligt ovan genom att trycka på . Ställ dig på vågen. Vid stabil vikt kommer vågen automatiskt låsa värdet. Om vikten efter låsning förändras mer än 4 kg aktiveras vågen igen och kommer, när vågen är stabil, återigen att automatiskt låsa värdet.

 BMI – Body Mass Index

1. Ställ en person på vågen och vänta tills vågen är stabil.
2. Tryck på  och använd sedan  eller  för att ställa in personens längd. Tryck sedan åter på  för att avsluta och visa uträknat BMI.
3. BMI-värdet försvinner när personen lämnar vågen men kan återkallas med .

Byte av batterier:

1. Koppla bort strömförsörjningen till vågen.
2. Ta bort batteriluckan på baksidan av indikatorn.
3. Sätt in 6 st. nya AA batterier och var noga med att polerna sitter rätt.
4. Stäng batteriluckan.

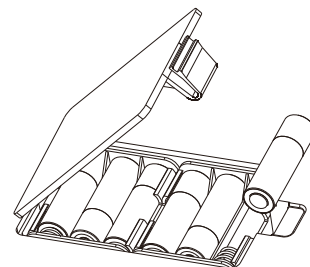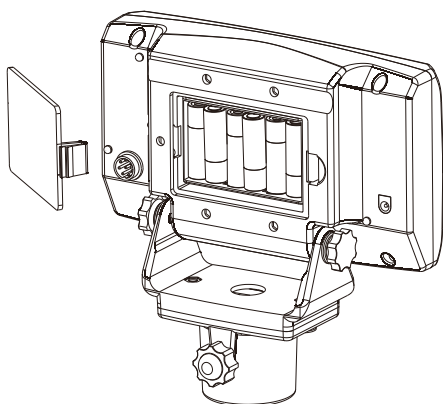

OBS! Använd **inte** uppladdningsbara batterier. Om ni gör det så ska batterierna laddas i extern laddare. Vågens adapter kan inte ladda batterierna när de sitter i vågen.

Montering


1. Ta försiktigt ut vågen från kartongen.




2. Lyft upp handtaget, som anges av pilen.
Skruva i de två rattarna så att ledstången är fast och inte glappar.




3. Rulla upp gummit och lossa första skruven.
Sätt i handtaget 1 i handtaget 2.
Dra sedan åt skruven och rulla tillbaka gummit på plats.

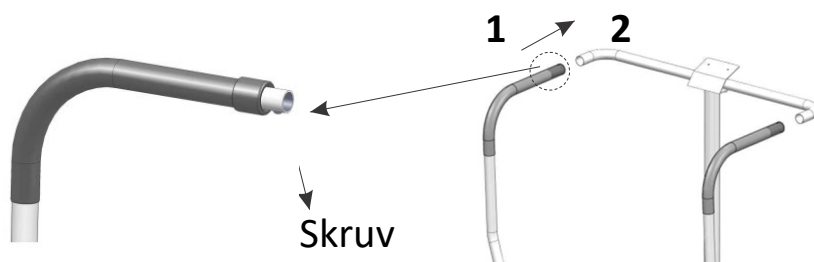

4. Placera ledstången på plattformen.
Skruva fast skruvarna under plattformen för att fästa ledstången.

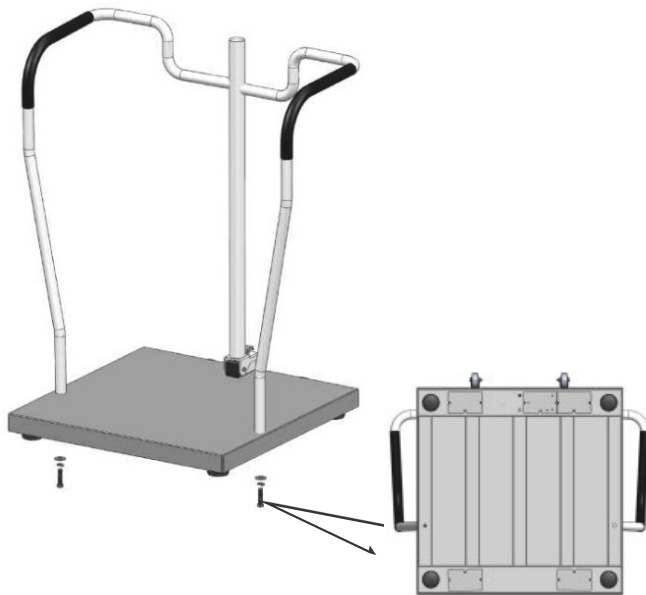

5. Placera våginstrumentet på plats och skruva fast ordentligt.

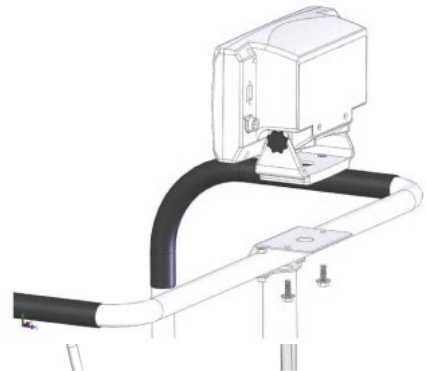

6. Anslut kabelkontakten till våginstrumentet.

